

# АКВА МАРИС

Изделие для промывания и орошения полости носа «Аква Марис», варианты исполнения:

- Изделие для промывания и орошения полости носа для детей «Аква Марис беби» 50 мл;
- Изделие для промывания и орошения полости носа для взрослых «Аква Марис норм» 50 мл и 100 мл.

Рег. Уд.: № ФСЗ 2011/09268 от 03.08.2011 г

**Описание:** прозрачная бесцветная жидкость без запаха с солоноватым вкусом.

Состав на 100 мл:

Действующее вещество:

Натуральная морская вода – 31,82 мл;

Вспомогательные вещества:

Вода очищенная – до 100 мл.

Не содержит химических добавок и консервантов.

## Форма выпуска:

«Аква Марис беби» - баллон 50 мл, для детей старше 1 года;

«Аква Марис норм» - баллоны 50 мл и 100 мл, для детей старше 2 лет и взрослых;

Препарат находится в металлическом баллоне под давлением.

Изделие упаковано в картонную коробку с вложенной инструкцией по применению.

## Механизм действия:

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки носовой полости. После применения изделия Аква Марис повышается терапевтическая эффективность лекарственных средств, наносимых на

слизистую оболочку носа, и сокращается продолжительность респираторных заболеваний.

Изделие для промывания и орошения полости носа «Аква Марис» снижает риск распространения инфекции в пазухи носа и полость уха (гайморит, фронтит, отит). Снижает риск локальных осложнений и ускоряет процессы заживления после хирургических вмешательств (удаление аденоидов, полипов, септопластика и др.) на носовой полости. Снимает раздражение слизистой носа у лиц, слизистая оболочка верхних дыхательных путей которых постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, живущие и работающие в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми климатическими условиями).

## Показания к применению:

Профилактика и комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):

- острые и хронические риниты;
- острые и хронические синуситы;
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические риниты;
- профилактика ОРВИ и гриппа;
- состояние после хирургических вмешательств;
- длительная терапия топическими кортикостероидами;
- Ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- Подготовка слизистой полости носа к нанесению лекарственных средств.



**Способ применения и дозы:**

Интраназально. В лечебных целях проводят промывание каждого носового хода 4-6 раз в день, ежедневно;

С целью профилактики - 2-4 раза в день;

С гигиенической целью - 1-2 раза в день (при необходимости чаще).

Длительность применения изделия Аква Марис не ограничена.

**Способ применения:*****Для детей от 1 года до 2 лет:***

Промывание носа у ребенка раннего возраста проводится в положении «лежа».

Повернуть голову ребенка набок.

Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость.

Посадить ребенка и помочь ему высморкаться.

При необходимости повторить процедуру.

Провести процедуру с другим носовым ходом.

***Для детей старше 2 лет:***

Наклонить голову набок.

Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость.

Высморкаться. При необходимости повторить процедуру.

Провести процедуру с другим носовым ходом.

***Для детей от 6 лет и взрослым***

Занять удобное положение перед раковиной и наклониться вперед.

Наклонить голову набок.

Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость.

Высморкаться. При необходимости повторить процедуру.

Провести процедуру с другим носовым ходом.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Беременность и кормление грудью не являются противопоказанием к применению.

**Меры предосторожности:**

Необходима консультация врача, если изделие применяется после операции.

**Побочные действия:**

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

**Условия хранения**

Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

Контейнер находится под давлением: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования.

**АО "ЯДРАН" Галенский Лабораторий,  
51000, Пулац б/н, Риека, Хорватия**

Произведено

S.P.P.H., Impasse des Boussenots, 21801, BP7,  
Quetigny Cedex, Франция

Представительство АО "ЯДРАН" Галенский  
Лабораторий в России:

119330, Москва, Ломоносовский

проспект д. 38 оф. 3,30.

Тел. (495) 970-18-82, 970-18-83

